



PRODOTTI E COMPETENZE PER DISTRIBUTORI E OPERATORI SANITARI

Cuscini e dispositivi di Posizionamento

www.biomatrix.it



Cuscini e dispositivi di posizionamento con microsfere

○ Dispositivi di supporto per un corretto posizionamento

I danni causati dall'allettamento possono compromettere tutte le cure e causare un recupero funzionale lento e spesso incompleto.

I cuscini di posizionamento, assicurano alle persone sottoposte a particolari trattamenti di mobilizzazione, un'eccellente mix tra comfort e adattabilità.

Cuscini
posizionatori
**RIUTILIZZABILI E
SANIFICABILI**



○ Un prodotto studiato per ogni utilizzo

Per ottenere la massima efficacia è opportuno utilizzare dispositivi di posizionamento idonei alla zona da trattare.

Un posizionamento ed un supporto corretto sono fondamentali per ridurre al minimo attriti e lacerazioni del paziente allettato e in carrozzina, anche nel post-operatorio. Riutilizzabili e adatti a tutti gli impieghi di prevenzione delle lesioni da pressione.



Riabilitazione



Terapia intensiva



Sala operatoria



Lungodegenza

Cuscini Posizionatori con microsfere



Bcode

Trova info su questa categoria subito on-line con questo codice

○ Sicurezza ed igiene dei supporti

La linea di posizionatori con Microsfere si adatta facilmente all'anatomia del corpo, favorendo il mantenimento della posizione corretta da parte del degente e risultando estremamente confortevole.

Ideale per:

- Periodo post operatorio
- Riabilitazione
- Lungodegenza
- Terapia intensiva



I cuscini di posizionamento sono composti internamente da microsfere di polistirene espanso. La fodera di rivestimento è in poliuretano bielastico, traspirante, impermeabile, antibatterico, sterilizzabile e supportato da uno strato di maglia in Jersey per una maggiore durata.

Per la pulizia quotidiana dei cuscini si consiglia l'utilizzo di un panno umido con l'eventuale aggiunta di disinfettante o detergente non aggressivo.



Per ridurre i rischi di cross-infection e per una protezione ulteriore si suggerisce l'utilizzo di una cover aggiuntiva, realizzata con lo stesso materiale della fodera di rivestimento, e chiusura a busta per evitare lesioni della cute.

La cover è lavabile ad una temperatura massima di 95°C e può essere sterilizzata in autoclave a 134°C per 3 minuti.

Utilizzi operativi

○ Posizione Prona



La posizione prona, detta anche la posizione del nuotatore, prevede il posizionamento del paziente con il lato ventrale verso il basso e la zona dorsale verso l'alto.

Le manovre di pronazione devono essere sempre effettuate in condizioni di sicurezza, e con il supporto dei presidi utili al posizionamento ottimale del paziente.

○ Posizione Semiprona



La posizione semiprona aiuta ad alleviare la pressione sul sacro e trocantere, in alternativa alla prona. A differenza della posizione totalmente ventrale, il paziente giace su un fianco con il peso distribuito verso l'osso iliaco anteriore, l'omero e la clavicola.

Il capo è ben sostenuto dal cuscino, per assicurare la comodità al paziente e per mantenere in lateroflessione la colonna cervicale.

○ Posizione Supina



È la posizione orizzontale assunta dal corpo quando è disteso su di un piano con il volto rivolto verso l'alto; si tratta di una posizione di mantenimento del riposo. L'allineamento posturale è indicato nelle persone prive di capacità motoria totale o parziale.

La posizione supina è controindicata per i pazienti con dispnea o che presentano rischio di aspirazione.

○ Decubito laterale



Questa postura viene utilizzata per garantire un periodo di riposo alle zone cutanee sottoposte a pressione durante il decubito supino.

È da evitare, sempre per il rischio di insorgenza di ulcere, il decubito laterale ad angolo retto sul trocantere. La posizione deve essere obliqua di 30°.

○ Posizione Semiseduta



Questa posizione consente un maggior comfort al paziente affetto da dispnea.

L'utilizzo combinato di diversi ausili di posizionamento rendono questa postura molto efficace e comoda per il degente.

○ Posizionatori consigliati
Posizione Supina

Capo



Posizionatore circolare a ciambella

Arto Superiore



Posizionatore per mano

Arto Inferiore



Posizionatore a cuneo



Posizionatore a trapezio



Posizionatore cilindrico

○ Posizionatori consigliati
Posizione Semiprona

Arto Superiore



Posizionatore a farfalla

Torace



Posizionatore posturale rettangolare

Arto Inferiore



Posizionatore a cuneo



Posizionatore a trapezio



Posizionatore a "S" modulare

○ Posizionatori consigliati
Posizione Supina

Arto Superiore



Posizionatore a farfalla

Torace



Posizionatore posturale rettangolare

Arto Inferiore



Posizionatore a cuneo



Posizionatore cilindrico

○ Posizionatori consigliati
Decubito laterale

Arto Superiore



Posizionatore a farfalla

Torace



Posizionatore posturale rettangolare

Arto Inferiore



Posizionatore a cuneo



Posizionatore a "S" modulare

○ Posizionatori consigliati
POSIZIONE Semiseduta

Capo



Posizionatore circolare a ciambella

Arto Superiore



Posizionatore per mano

Arto Inferiore



Posizionatore a cuneo




Posizionatore a trapezio



Posizionatore cilindrico

Utilizzi operativi

CUSCINI E DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO

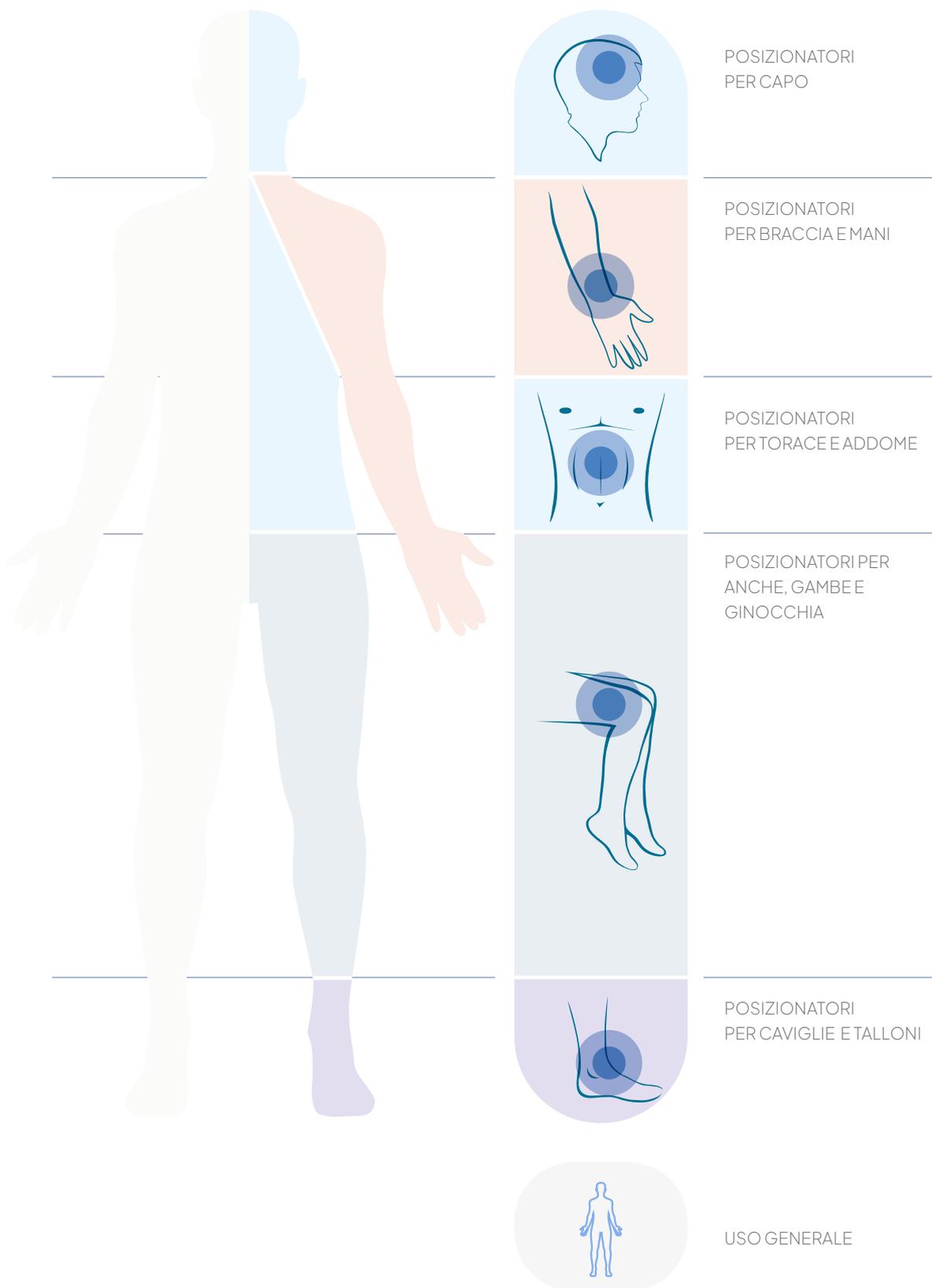

Un posizionamento ed un supporto corretto sono fondamentali per ridurre al minimo attriti e lacerazioni cutanee del paziente allettato ed in carrozzina.

Codice	Circonferenza paziente in cm	Forma
CD02600	ø 30x185	
CD02601XS CD02601S CD02601L	ø 20x90 ø 40x140 ø 30x180	
CD02602	ø 18x80	
CD02603S CD02603M CD02603L CD02603XL	18x30 31x41 38x55 40x60	
CD02604	40x20x15	
CD02605S CD02605L	30x15x20 48x30x12	
CD02606	62x42x18/6	
CD02607	60x26x42	
CD02608	ø 47	
CD02609	21x15x12	
CD02610	70x60x20	
CD02611	40x40x10	
CD02612	45x22x18	
CD02613	ø 5,5x16	



Posizionatori con microsfere

Pensati per garantire maggiore comfort e minore pressione nelle zone d'appoggio.

L'imbottitura con microsfere permette un totale e continuo adattamento all'anatomia del paziente.

La fodera di rivestimento estremamente morbida, non removibile, è studiata per diminuire l'attrito tra la cute ed il cuscino.

Certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® a garanzia di una maggiore sicurezza e tutela per la salute del paziente.



CD02600

Cuscino di posizionamento a "S" modulare per anche e ginocchia

Cuscino multifunzionale, sostiene in modo confortevole il paziente sia a livello delle spalle, del dorso e delle anche, sia a livello delle ginocchia in caso di posizionamento in decubito laterale.

CD02600 Ø 30x185 cm



PIÙ MISURE

CD02601

+ NEW

Cuscino di posizionamento a mezzaluna per paziente in posizione seduta

Usato per sostenere la schiena e dare sollievo a gomiti e spalle.

CD02601XS Ø 20x90 cm

CD02601S Ø 40x140 cm

CD02601L Ø 30x180 cm



CD02602

Cuscino di posizionamento cilindrico

Usato per sostenere caviglie e talloni.

CD02602 Ø 18x80 cm

PIÙ MISURE

CD02603

+ NEW

Cuscino di posizionamento posturale rettangolare


Cuscino multifunzionale, sostiene in modo confortevole il paziente sia a livello cervicale, sia a livello delle ginocchia in caso di posizionamento in decubito laterale.

CD02603S 18x30 cm

CD02603M 31x41 cm

CD02603L 38x55 cm

CD02603XL 40x60 cm

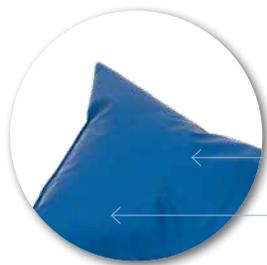

Fodera in poliuretano antibatterico

Bielastico e traspirante
Certificazione Standard 100 di OEKO-TEX®



CD02604

Cuscino di posizionamento a farfalla

Grazie alla sua forma può essere utilizzato come supporto per gli arti superiori / inferiori e per la schiena.

CD02604 40x20x15 cm



CD02606

Cuscino di posizionamento a trapezio

Grazie alla sua forma sostiene collo, capo ed arti inferiori.

CD02606 62x42x18/6 cm



PIÙ MISURE

CD02605

Cuscino di posizionamento a cuneo

La sua forma lo rende idoneo al supporto di collo, capo e arti inferiori.

CD02605S 30x15x20 cm

CD02605L 48x30x12 cm



CD02607

Cuscino di posizionamento triangolare

Grazie alla sua forma può essere utilizzato come supporto per gli arti inferiori.

CD02607 60x26x42 cm

Posizionatori con microsfere

CUSCINI E DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO



CD02608

Cuscino di posizionamento circolare a ciambella

Usato per la protezione ed il corretto posizionamento di collo e testa.

CD02608

Ø 47 cm



CD02609

Cuscino di posizionamento per mano

Grazie alla sua forma è utilizzato come supporto per mano e polso.

CD02609

21x15x12 cm



CD02610

+ NEW

Cuscino abduttore sagomato per arti inferiori

Sostiene in modo confortevole il paziente a livello delle ginocchia e degli arti inferiori in caso di posizionamento in decubito laterale.

CD02610

70x60x20 cm



CD02611

+ NEW

Cuscino di posizionamento circolare con foro

Usato per la protezione ed il corretto posizionamento della testa.

CD02611

40x40x10 cm



CD02612

+ NEW

Cuscino di posizionamento per arto superiore

Grazie alla sua forma è utilizzato per sostenere sia il capo a livello cervicale, che gli arti.

CD026012

45x22x18 cm



CD02613

+ NEW

Cuscino di posizionamento per la riabilitazione della mano

Cuscino cilindrico per il supporto e la riabilitazione della mano e del polso. Fodera di rivestimento in maglina di cotone.

CD026013

Ø5,5x16 cm



PIÙ MISURE



CD026XXCP

+ NEW

Cover di ricambio per posizionatori con microsfere

Cover aggiuntiva con chiusura a busta. Realizzata in poliuretano bielastico, traspirante, impermeabile, antibatterico, sterilizzabile e supportato da uno strato di maglia in Jersey per una maggiore durata. Disponibile in varie dimensioni e forme su richiesta

CD026XXCP

varie dimensioni



PIÙ MISURE



CD02W600

+ NEW

Borsa per posizionatori con microsfere

Realizzata in tessuto poliestere con cuciture rinforzate e robuste cerniere.

CD02W600

varie dimensioni



CUSCINI E DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO

BioMatrix

Via Maffini, 23 - 29010 San Giuliano di Castelvetro (PC)
Tel. 0523.826619 Fax. 0523826728
e-mail: info@biomatrix.it

Tutti i diritti sono riservati. Variazioni possono essere apportate senza obbligo di preavviso.
BioMatrix S.r.l non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questa sede.

www.biomatrix.it

