



PRODOTTI E COMPETENZE PER DISTRIBUTORI E OPERATORI SANITARI

Posizionatori Sala Operatoria

www.biomatrix.it





Rivenditore autorizzato

Indice

Introduzione	4
Bi-VACUUM Materassini a depressione	8
Materassino antiscivolo monouso per operazioni in Trendelenburg	12
Posizionatore facciale prono monouso	14
Cuscino di posizionamento ad aria	15
Posizionatori proni	16
Posizionatore Octo-Pos	17
Posizionatori per Sala Operatoria in Gel	18
Posizionatori per Sala Operatoria monouso	28
Posizionatori in poliuretano pluriuso per Sala Operatoria	32
Igiene	36

Utilizzi operativi

○ Posizione Supina



Da accesso a quasi tutti i siti chirurgici. Prevede che il capo sia allineato con il resto del corpo.

ATTENZIONE! Non far debordare i piedi dal tavolo per non incorrere a compressioni o lesioni del nervo Peroneo o del tendine di Achille.

○ Posizione Ginecologica o Litotomica



Questa posizione richiede l'intervento di due persone che alzino gli arti inferiori in modo simultaneo. A paziente sveglio si potrebbe chiedere la collaborazione dell'ammalato: cura si dovrà avere nel tornare nella posizione primaria.

ATTENZIONE! La zona perineale deve debordare dal piano del tavolo di circa 3-5 cm. per poter effettuare l'intervento.

○ Decubito Laterale



Posizione utilizzata per la chirurgia toracica e per la chirurgia del rene. Essendo una posizione difficile da ottenere è fondamentale l'utilizzo di una superficie di appoggio confortevole.

ATTENZIONE! Il reggibraccio (braccio inferiore) non deve superare un'angolazione di 90° rispetto al corpo. La flessione viene applicata in modo diverso in base all'intervento da eseguire.

○ Posizione Prona



Questa posizione consente l'accesso chirurgico alla colonna vertebrale e alla zona posteriore del capo.

ATTENZIONE! La testa deve essere allineata con il resto del corpo e il volto posizionato su dispositivo adeguato e che permetta di lasciare libera l'area intubata.

○ Posizionatori consigliati: **Posizione supina**

Capo



Arto Superiore



Zona Sacrale



Cosce e Ginocchia



Gambe e Piedi



○ Posizionatori consigliati: **Posizione Ginecologica o Litotomica**

Capo



Arto Superiore



Zona Spalle



Zona Lombo-Sacrale



Arto Inferiore



○ Posizionatori consigliati: **Decubito Laterale**

Arto Superiore



Capo



Arto Inferiore



Bacino



Ginocchia



Piedi e Caviglie



○ Posizionatori consigliati: **Posizione Prona**

Capo



Arto Superiore



Torace



Bacino




Arto Inferiore



Utilizzi operativi

POSIZIONATORI SALA OPERATORIA

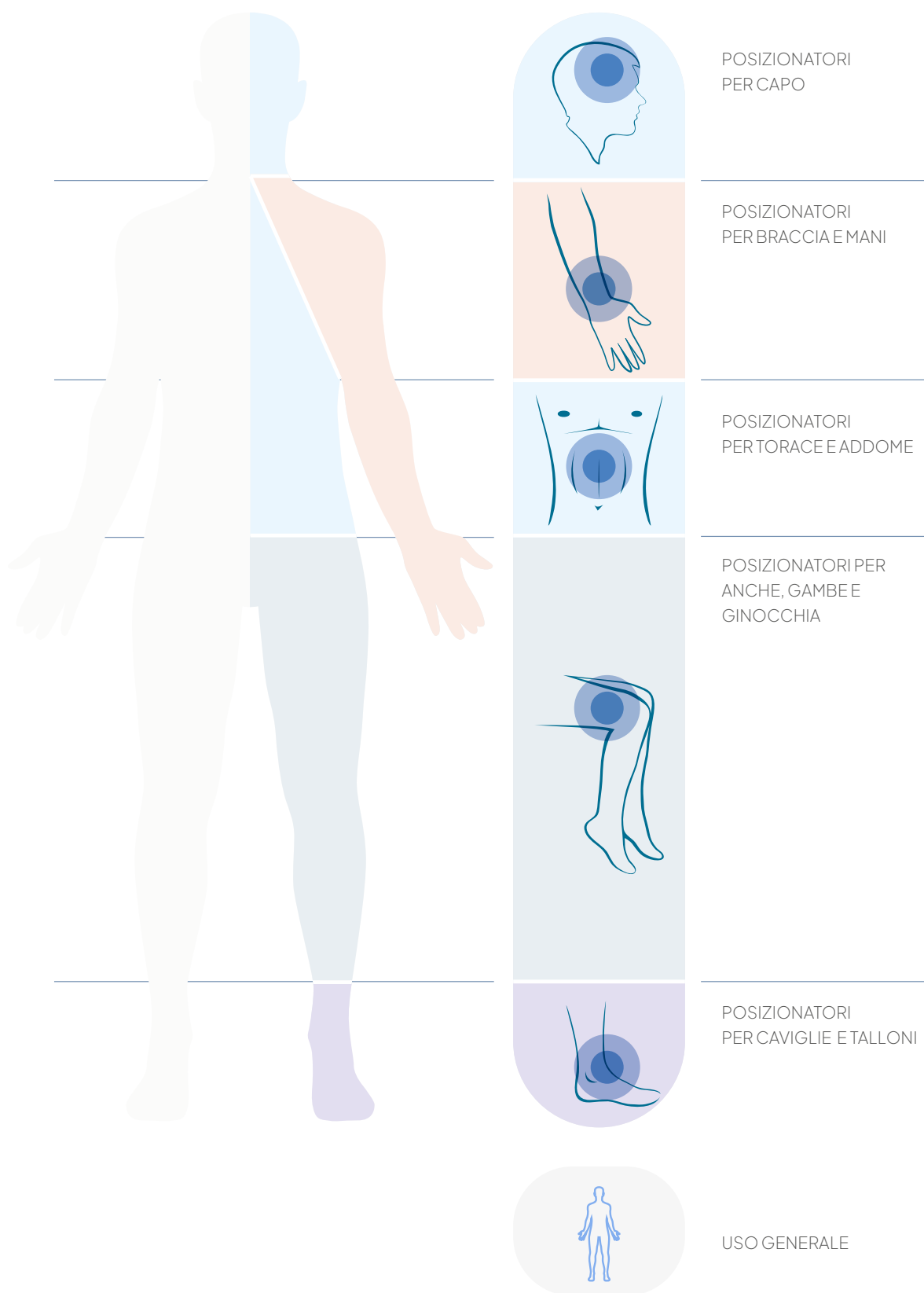


Tipologia di intervento o tecnica chirurgica

Analizzato il caso, il medico ed il suo team, definiscono il posizionamento ideale considerando la specifica situazione del paziente.




Distretto anatomico da trattare

In base alla localizzazione dell'intervento è possibile preferire varie tipologie di posizionatori. Dimensione, conformazione e tipologia di posizionatore possono essere determinati non solo dal distretto da trattare, ma anche dalle caratteristiche antropometriche del paziente. È inoltre fondamentale considerare il potenziale danno da pressione a carico di zone non direttamente interessate dall'attività chirurgica.

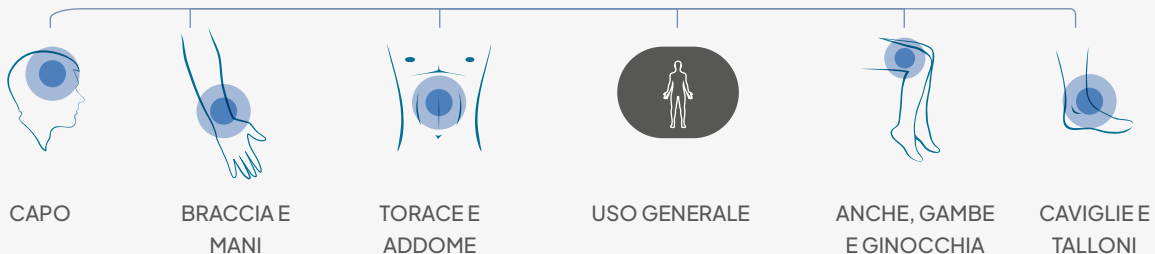

Tipo di materiale e di posizionatore

Si tiene conto infine della durata dell'intervento, del livello di comfort richiesto, delle pratiche e degli strumenti utilizzati per verificare la compatibilità dei materiali.

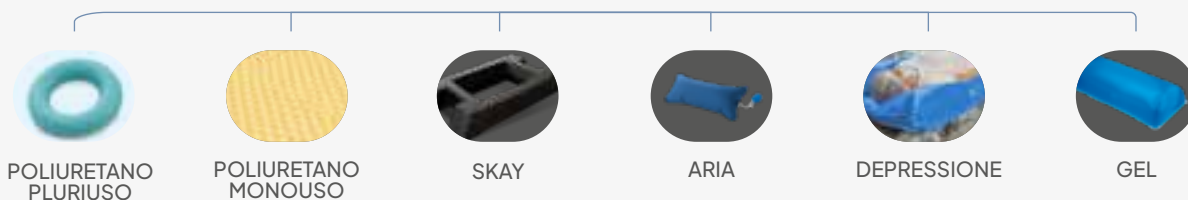

Bi-VACUUM

Materassini a depressione

Ideale per le operazioni di lunga durata e per gli interventi che richiedono di esporre zone anatomiche particolari non raggiungibili in posture convenzionali come quella supina o prona. Particolarmente suggerito per i pazienti anziani o persone con condizioni fisiche-motorie non ottimali.

Regolare la depressione anche durante l'intervento

Il processo di immissione e depressione dell'aria all'interno del materassino può essere effettuato anche durante l'intervento grazie alla valvola di non ritorno. Se ritenuto necessario dal chirurgo, il paziente sedato può essere infatti riposizionato senza che Bi-VACUUM venga rimosso. Il paziente inoltre può essere sottoposto ad esami radiologici grazie alla radiotrasparenza del materassino.

Utilizzatelo come dispositivo di traslazione


Ad intervento ultimato si può posizionare il materassino come fosse un telo di trasferimento e deprimerlo per conferire quella rigidità necessaria ad usarlo come ausilio per traslare il paziente.

Esterno

La parte esterna, composta da un mix di PVC e Poliuretano, è caratterizzata da un effetto vellutato a contatto con il paziente, che dona comfort e previene l'insorgere di qualsiasi irritazione o lesione cutanea.

Interno

La sua composizione interna, costituita da microsfere di polistirene espanso, durante la depressione dell'aria, stabilizza in maniera ottimale il paziente, adattandosi ergonomicamente alla sua anatomia e alla posizione assunta.

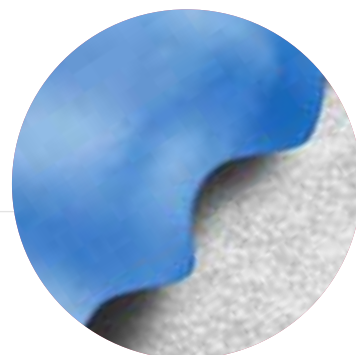



POSIZIONATORI SALA OPERATORIA



Valvola CPC

Valvola di non ritorno.



● B^{code}

Trova info su questa categoria subito on-line con questo codice

Bi-VACUUM

Bi-VACUUM apporta numerosi vantaggi al lavoro degli operatori, assicurando i massimi standard di agio e sicurezza ai pazienti:

Maggiore stabilità

I posizionatori a depressione Bi-VACUUM si conformano perfettamente e saldamente al corpo del paziente e garantiscono un posizionamento più sicuro di quello ottenuto con altri sistemi che vengono semplicemente poggiati contro il paziente

Ottimo accesso al campo operatori

Grazie ai posizionatori a depressione Bi-VACUUM il paziente può essere posizionato esattamente come il chirurgo desidera per un'ottimale preparazione del campo operatorio.

Accesso agli arti


I posizionatori a depressione Bi-VACUUM permettono di immobilizzare il paziente in posizioni difficilmente raggiungibili con altri sistemi. I posizionatori a depressione Bi-VACUUM consentono inoltre di manovrare le gambe e le braccia del paziente senza doverlo riposizionare.

Risparmio di tempo


Utilizzando i posizionatori a depressione Bi-VACUUM, il paziente viene facilmente posizionato sul tavolo operatorio e, se necessario, può essere rapidamente riposizionato durante l'intervento facendo risparmiare tempo prezioso all'intero staff.

Materassini standard


+ NEW

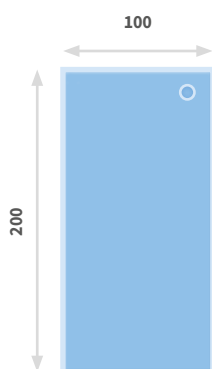


SO058006

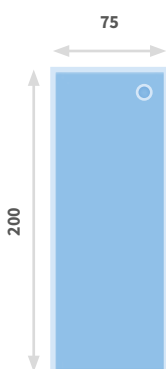


SO058003

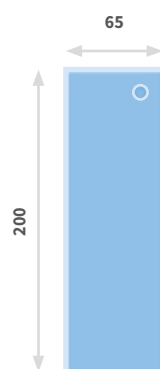


SO058004

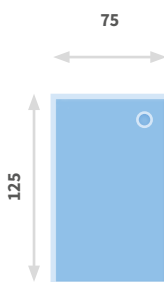

SO058002

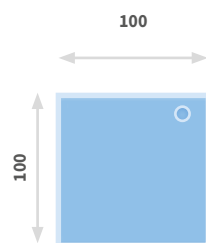

SO058005

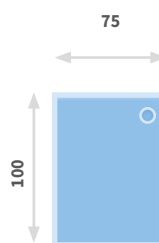

SO058001

Codice	Misura
SO058006	100x200 cm
SO058003	75x200 cm
SO058004	65x200 cm


Codice	Misura
SO058002	75x125 cm
SO058005	100x100 cm
SO058001	75x100 cm




DISPONIBILE Kit di Riparazione

SO05W00 Kit Riparazione per materassino a depressione Bi-Vacuum


Materassini sagomati

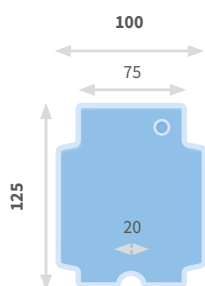


SO059004

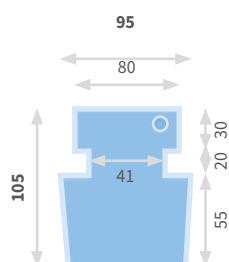

SO059003

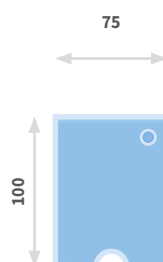

SO059002

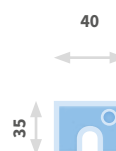


SO059001


Codice	Misura
SO059004	75/100x125 cm
SO059003	80/95x105 CM

Codice	Misura
SO059002	75x100 cm
SO059001	35x40 cm


Materassini a 4 camere standard / Materassini a 4 camere sagomati

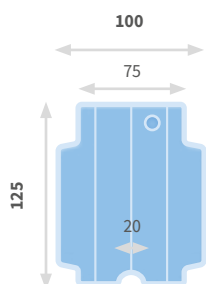


SO05900S3

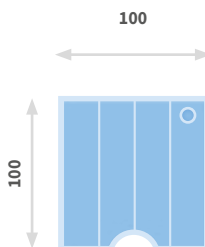

SO05900S2

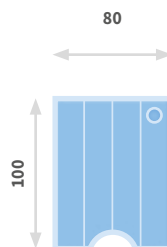

SO05900S1

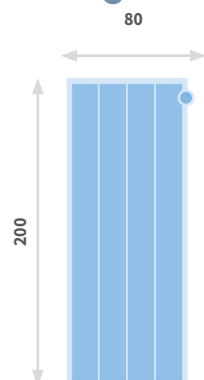

SO05800S1

Codice	Misura
SO05900S3	75/100x125 cm
SO05900S2	100x100 cm

Codice	Misura
SO05900S1	80x100 cm
SO05800S1	80x200 cm

Bi-Pad

Materassino antiscivolo monouso per operazioni in Trendelenburg

Si adatta perfettamente al corpo del paziente, evitando scivolamenti e favorendone l'ancoraggio al tavolo operatorio durante gli interventi che richiedono la posizione di Trendelenburg e anti-Trendelenburg (chirurgia ginecologica, coloretale, urologica); eseguite sia per via laparoscopica che robotica.

Realizzato in poliuretano viscoelastico a lenta memoria, questo particolare materiale svolge un'importante funzione antidecubito, proteggendo così il paziente da lesioni da pressioni cutanee.

La sua caratteristica monouso garantisce la riduzione al minimo dei rischi di contaminazione incrociata.



Bi-Pad


+ NEW

Dimensioni STANDARD

Lunghezza: 90 cm

Profondità: 52 cm

Altezza totale: 3 cm

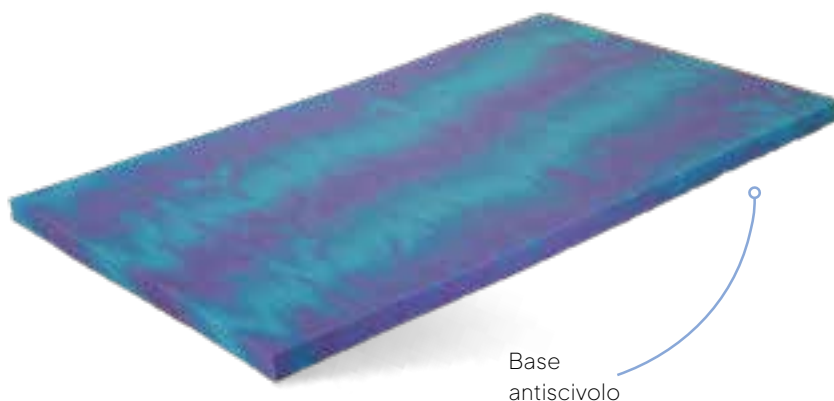

SO02815DVG52

Bi-Pad materassino monouso

SO02815S

Bi-Pad materassino monouso con silicone

SO02815V

Bi-Pad materassino antiscivolo per sala operatoria con cinghie e spunlace

SO02815V.I

Bi-Pad materassino antiscivolo con intaglio perineale con cinghie e spunlace

SO02815V.75

Bi-Pad materassino antiscivolo con cinghie e spunlace cm 75x50x3

SO02815VKIT

Bi-Pad materassino antiscivolo con cinghie, spunlace e fissaggio toracico

SO02815VKIT.I

Bi-Pad materassino antiscivolo con intaglio perineale, cinghie, spunlace e fissaggio toracico


SO02815VL

Bi-Pad materassino antiscivolo lungo con cinghie e spunlace cm 180x52x3

SO02815VKITL

Bi-Pad materassino antiscivolo lungo con cinghie, spunlace e fissaggio toracico cm 180x52x3

Possibilità di creare KIT personalizzati

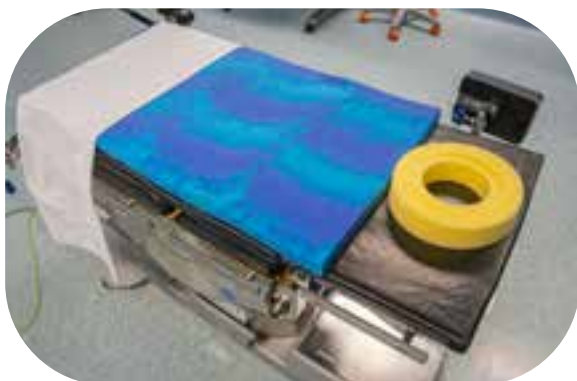

Esempio di utilizzo del Materassino antiscivolo in sala operatoria (in combinazione con SO02800 Appoggiatesta a ciambella monouso; SO059004 - Materassino a depressione sagomato).

Telo tubolare in Spunlace

Il telo tubolare in tessuto Spunlace può essere utilizzato per trattenere le braccia del paziente, assicurando una maggiore stabilità sul tavolo operatorio durante operazioni in trendelenburg.



SO02W815S

+ NEW

Telo tubolare
in Spunlace

Caratteristiche tecniche

Materiale: tessuto in Spunlace

Dimensione: 220X30 cm

Confezione: 10 pezzi



Esempio di utilizzo del Telo in Spunlace (SO02W815S) in combinazione con il materassino antiscivolo (SO02815V).

POSIZIONATORI SALA OPERATORIA

BIOMATRIX
PRODOTTI MEDICALI

Posizionatore facciale prono monouso

Specchio pluriuso per posizionatore facciale prono monouso.



SO02816 - SO02W816


+ NEW

Ideale ove vi sia la necessità di mantenere il paziente in posizione prona.

La schiuma di poliuretano ad alta densità che lo compone dona comfort al paziente, evitando spiacevoli fastidi e lesioni durante e dopo il prolungato posizionamento prono del viso. L'ampia superficie d'appoggio al tavolo operatorio dà stabilità al capo durante gli interventi, garantendo al contempo comodità e sicurezza.

Grazie all'applicazione di uno specchietto pluriuso in materiale acrilico, che viene posto alla base del posizionatore facciale, il chirurgo e l'equipe medica possono monitorare in qualsiasi momento dell'intervento le condizioni del paziente, sia in caso di sedazione completa che parziale. Il materiale sintetico dello specchio lo rende estremamente leggero ed al tempo stesso sicuro (SO02W816).

Il posizionatore facciale viene utilizzato talvolta anche in Terapia intensiva per pazienti affetti da disfunzioni respiratorie che hanno la necessità di assumere la posizione prona per migliorare la capacità polmonare: in questa particolare situazione e in tutti i casi in cui il paziente è prono, cosciente e non sedato, il posizionatore necessita dello specchio.

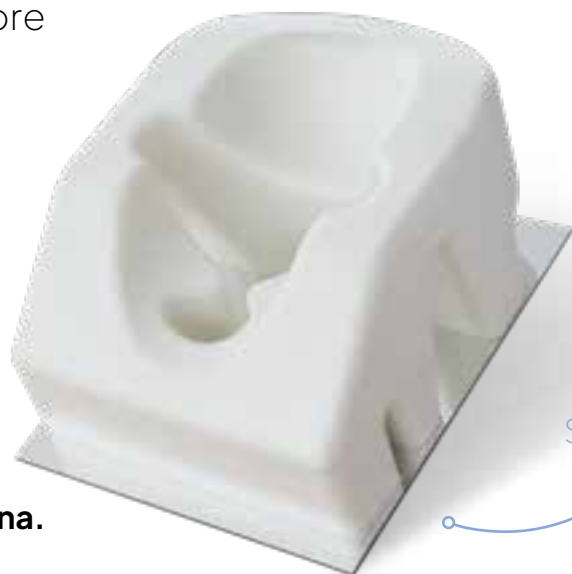

Specchio



Esempio di utilizzo del Posizionatore facciale prono in sala operatoria, con specchio per il monitoraggio del paziente (in combinazione con SO03800 - Posizionatore prono; SO02813 - Lastra bugnata monouso e CD01608 - Cuscino cilindrico in poliuretano pluriuso).

Cuscino di posizionamento ad aria

Cuscino di posizionamento gonfiabile progettato per sostenere la spalla del paziente durante le procedure e gli esami chirurgici o medici.



SO04800

+ NEW

Cuscino di posizionamento ad aria

Cuscino di posizionamento gonfiabile progettato per sostenere la spalla del paziente durante le procedure e gli esami chirurgici o medici.

Il dispositivo può essere regolato manualmente, a seconda delle necessità, garantendo una distribuzione uniforme del peso e un notevole miglioramento del comfort del paziente.

Il suo utilizzo permette di sollevare e girare i pazienti in modo rapido, semplice, ergonomico, igienico e sicuro.

Il dispositivo è utile durante la sostituzione totale dell'anca, la toracotomia, l'artroscopia della spalla e la chirurgia renale. Si raccomanda l'utilizzo con pazienti leggermente sedati sottoposti ad anestesia epidurale e pazienti sottoposti ad interventi di lunga durata.

Il cuscino di posizionamento ad aria può essere facilmente pulito con un panno imbevuto da qualsiasi detergente delicato o alcol isopropilico al 70% o con soluzione di candeggina allo 0,5% oppure con una salvietta disinfettante. Si raccomanda di lasciare asciugare completamente il dispositivo prima di riutilizzarlo.

SO04800 56X25 cm

SO04801 63X25 cm

SO04802 50X25 cm

SO04803 30X20 cm

Caratteristiche tecniche

Materiale: Realizzato interamente in nylon-poliuretano.

Fornito provvisto di tubo di gonfiaggio.

Permeabile ai raggi X

Latex free.

POSIZIONATORI SALA OPERATORIA

BIOMATRIX
PRODOTTI MEDICALI



Su richiesta e' possibile sostituire la valvola di gonfiaggio con Valvola CPC

Posizionatori proni

Offrono una soluzione versatile ed efficiente per il supporto ed il posizionamento del paziente, in posizione prona, durante le procedure mediche.



SO03800 - SO03800S

+ NEW

Posizionatore prono

La sua struttura permette la distribuzione uniforme della pressione anche con pazienti di peso corporeo molto elevato. Riduce la pressione a livello addominale e utilizzato a livello intraoperatorio riduce l'ipertensione addominale dando alcuni vantaggi come migliore ventilazione e riduzione del sanguinamento.

Il posizionatore prono è realizzato in poliuretano espanso ignifugo ad alta densità e rivestito da una cover removibile in Skay ignifugo.

Caratteristiche tecniche

Il foro interno presenta una struttura trapezoidale:

nella zona a contatto con il paziente, questa caratteristica lo rende ancor più confortevole e sicuro.

SO03800 80X50X12 cm

SO03800S 80X46X10 cm



RIVESTIMENTO
IN SKAY
IGNIFUGO

Cuscino di posizionamento toracico

Realizzato internamente in poliuretano viscoelastico ignifugo, densità VE50/FR-VE850385 e rivestito in ecopelle ignifuga.

I materiali utilizzati sono tutti di origine italiana.

Si consiglia di utilizzare il dispositivo ricoperto con un telino monouso in TNT per garantire una maggiore igiene.

Articolo realizzabile su misura.

Dimensioni

Lunghezza: 30 cm

Profondità: 50 cm

Altezza totale: 17,10 cm



SO03804

+ NEW





SO03800N

+ NEW

Octo-Pos

Comfort maggiorato grazie al nuovo design arrotondato

Grazie al nuovo design il posizionatore offre forme arrotondate soprattutto sui punti critici di contatto. In questo modo si evitano danni da pressione in modo particolare negli interventi di lunga durata. La parte interna ha una smussatura a 45°.

Flessibilità totale grazie ai moduli spaziatori aggiuntivi

Il posizionatore è dotato di serie di moduli asportabili di 5cm di spessore che permettono di impostare il dispositivo in modo ottimale sui pazienti. Per un dimensionamento ancora più preciso e per rispondere ad ogni esigenza della sala operatoria, sono disponibili kit di spaziatori da 2,5 cm.

Realizzato in espanso rivestito di resina poliuretanica mono-componente idrorepellente, ad alta resistenza, traspirante, esente da formaldeide, bio-rigidamente degradabile, non contiene additivi tossici.

SO03800N 76X45X11,5 cm


Clavicole e torace
Smussatura



Un solo dispositivo
anche per pazienti
over-size

Spaziatori
standard

Spaziatori
opzionali

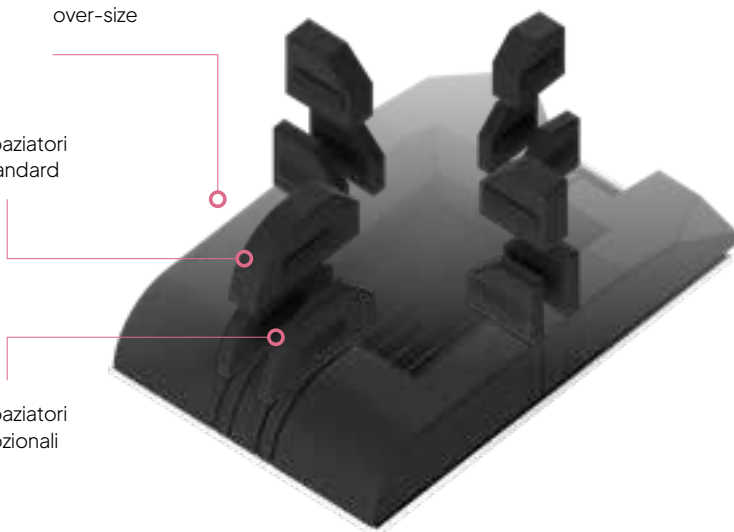

Posizionatori per Sala Operatoria in gel

La persona sottoposta ad intervento chirurgico, parzialmente o totalmente sedata, potrebbe essere costretta nella stessa posizione per ore, tempo necessario per l'insorgenza delle Lesioni da Pressione.

I posizionatori in Gel sono compatti e grazie alle loro caratteristiche fisiche e alla loro densità, riescono ad adattarsi alla superficie corporea, consentendo un appoggio confortevole del paziente sul lettino.

Tra le proprietà riconosciamo le seguenti:

- Capacità idrorepellente,
- Non variano la loro durezza nel tempo,
- Se danneggiati da tagli il gel non fuoriesce,
- Facilmente sanificabili,
- Isotermici,
- Si possono associare a materassi riscaldatori o refrigeranti.

Volendo aumentare comfort e prevenzione delle lesioni cutanee possiamo abbinare i dispositivi in schiuma.



● **B**code

Trova info su questa categoria subito on-line con questo codice

Linea di Posizionatori in gel



SO01800

Appoggiatesta ad anello chiuso

SO01800S - 9x4x2 cm

SO01800M - 14x6x3,5 cm

SO01800L - 20x7,5x4,5 cm

SO01800XL - 20x7,5x7,5 cm



SO01801

Appoggiatesta ad anello aperto

SO01801S - 9x4x2 cm

SO01801M - 14x6x3,5 cm

SO01801L - 20x7,5x4,5 cm

SO01801XL - 20x7,5x7,5 cm



SO01802

Appoggiatesta a ferro di cavallo

SO01802S - 9x4x2 cm

SO01802M - 14x6x3,5 cm

SO01802L - 20x7,5x4,5 cm

Posizionatori

per Sala Operatoria in Gel

POSIZIONATORI SALA OPERATORIA



SO01804

**Appoggiatesta
prono**

SO01804L

28x23x14,5 cm

SO01804S

23x19x13 cm



SO01803

Appoggiaviso

SO01803

16x6x1,6 cm



SO01805

**Appoggiatesta
stabilizzante**

SO01805

19x19x6 cm



SO01806

**Appoggiatesta
sagomato**

SO01806

27x23x7 cm




SO01807

**Appoggiatesta
supino**

SO01807

27x24x9 cm

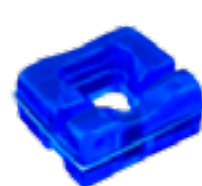


SO01849

**Appoggiatesta
prono a 4 vie**

SO01849

23x20x11 cm

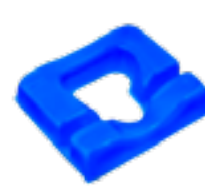

SO01849-1

**Appoggiatesta
prono a 2 vie**

SO01849-1

23x20x6 cm

Posizionatori

per Sala Operatoria in Gel



SO01808

Protezione per il braccio

SO01808S

40x12,5x2 cm

SO01808L

60x12,5x2 cm



SO01809

Protezione anatomica per il braccio


SO01809S - 40x12,5x6 cm

SO01809M - 50x12,5x6 cm

SO01809L - 60x12,5x6 cm

SO01809XL - 63x12,5x6 cm

SO01810 - 52x15x5,5 cm

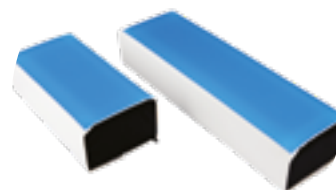

SO01824

Posizionatore in gel e schiuma per braccio

SO01824A - 16x8x6 cm

SO01824B - 70x20x8 cm

SO01824C - 30x15x10 cm

SO01824D - 50x15x10 cm

SO01824E - 60x15x10 cm



SO01811

Protezione per nervo ulnare

SO01811S

38x12x0,8 cm

SO01811L

46x21x0,8 cm



SO01820

Posizionatore laterale

SO01820

72x50x16 cm



SO01812

Cinture di bloccaggio

SO01812S

33x7x1,5 cm

SO01812L

36x7x1,5 cm

Posizionatori

per Sala Operatoria in Gel



SO01814

Posizionatore a rullo sagomato

SO01814S


30x16x13/9 cm

SO01814M

40x16x13/9 cm

SO01814L

50x16x13/9 cm

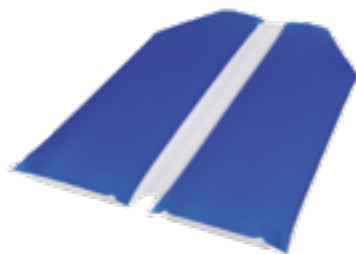

SO01815

Set posizionatore per torace

SO01815SX

71/58x20x7,6 cm

SO01815DX

71/58x20x7,6 cm




SO01815

Posizionatore per interventi alla ghiandola tiroidea light

SO01851

51x40x14 cm

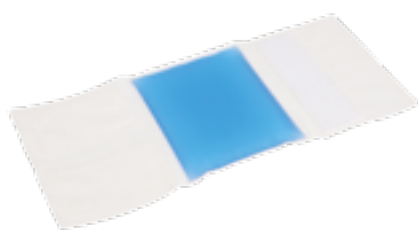

SO01825

Cuscino per spalle con Velcro

SO01825

5x13x2,5 cm



SO01813

Posizionatore a rullo

Dimensioni • Adulti

SO01813A - 30x15x10 cm

SO01813B - 40x15x10 cm

SO01813C - 50x15x10 cm

SO01813D - 30x10x8,5 cm

SO01813E - 40x10x8,5 cm

SO01813F - 50x10x8,5 cm

SO01813G - 50x18x15 cm

Dimensioni • Bambini

SO01813H - 15x5x5 cm

SO01813I - 20x5x5 cm

SO01813J - 25x5x5 cm

SO01813K - 30x5x5 cm

SO01813L - 15x7,5x7,5 cm


SO01813M - 20x7,5x7,5 cm

SO01813N - 25x7,5x7,5 cm

SO01813O - 30x7,5x7,5 cm

Posizionatori

per Sala Operatoria in Gel

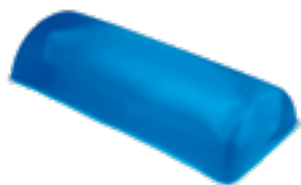

SO01828

Posizionatore dome

SO01828

35x15x7,5 cm




SO01816

Posizionatore per anca

SO01816

14x20x1,3 cm

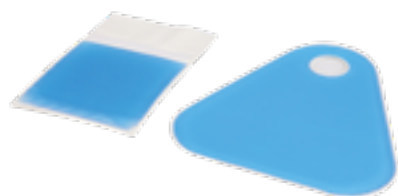

SO01817-18


Posizionatore per anca con foro per perno

SO01817

18x18x1,3 cm

SO01818

33x30x0,8 cm

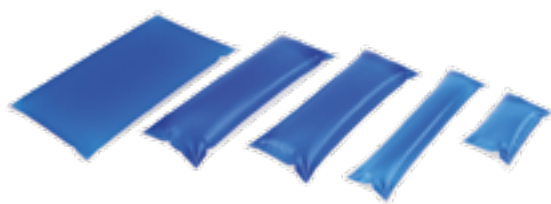

SO01819

Posizionatore universale ovale

SO01819A - 16x8x4,5 cm

SO01819B - 33x7x5 cm

SO01819C - 46x21x0,8 cm

SO01819D - 36x12,5x7 cm

SO01819E - 25x12,5x5 cm

SO01819F - 38x12,5x6,3 cm

SO01819G - 50x12,5x7 cm



SO01821

Set telaio di Relton

SO01821

19x17,5x10,5 cm

POSIZIONATORI SALA OPERATORIA

BIOMATRIX
PRODOTTI MEDICALI

Posizionatori per Sala Operatoria in gel

Telaio di Wilson



SO01822C - SO01823

Set telaio di Wilson

Serve per mantenere i pazienti in posizione flessa durante le procedure lombari e della colonna vertebrale (laminectomia lombare, decompressioni, chirurgia spinale).

Le lastre proteggono il paziente e favoriscono una posa più confortevole. Inoltre favoriscono una bassa pressione nelle zone d'appoggio.

SO01823

Telaio di Wilson 60x49x15,5 cm

SO01822C

Lastre lunghe lat. 72,5x17,5x2 cm

Lastra non svasata 18,5x12x2 cm

Lastra svasata 18,5x12x2 cm



Lastre per telaio di Wilson



SO01822

Si fissano al telaio di Wilson tramite delle apposite cinghie; il rivestimento in gel protegge il paziente offrendo una posa più confortevole.

Le protezioni favoriscono una bassa pressione nelle zone d'appoggio.

SO01822A

75x25x2,5 cm

SO01822B

75x25x1 cm





SO01826A

Coppe per talloni

SO01826A
20x11x7 cm



SO01826B

Protezione per talloni

SO01826B
17x11x5 cm



SO01827A

Protezione per talloni con cinturino

SO01827A
17x18x1,3 cm



SO01827B

Protezione per talloni con Velcro

SO01827B
17x23x1,3 cm



SO01832

Cuscino per polpaccio/tallone

SO01832
71x41/30x1 cm



SO01833

Protezione piede

SO01833
37x24x0,5 cm

Lastre in gel per tavolo operatorio

Proteggono l'intera superficie del tavolo operatorio e sono raccomandate per qualsiasi posizione.

Le lastre sono soffici, confortevoli e versatili.
Distribuiscono il peso del paziente uniformemente su tutta la superficie.



SO01837 - SO01839



SO01837A - 23x50x1 cm
SO01837B - 99x50x1 cm
SO01837C - 50x50x1 cm
SO01837C-1 - 50x50x1,5 cm
SO01837D - 50x25x1 cm
SO01837D-1 - 50x25x1,5 cm
SO01837E - 10x38x1 cm
SO01837F - 42x15x1 cm
SO01837G - 10x61x1
SO01837H - 50x45x1 cm
SO01837H-1 - 50x45x1,5 cm

SO01837I - 193x86x1 cm
SO01837J - 183x50x1 cm
SO01837J-1 - 183x50x1,5 cm
SO01837K - 117x50x1 cm
SO01837K-1 - 117x50x1,5 cm
SO01837L - 160x43x1 cm
SO01837M - 15x35x1 cm
SO01837M-1 - 15x35x1,5 cm
SO01837N - 70x50x1 cm
SO01837N-1 - 70x50x1,5 cm
SO01837O-1 - 70x45x1,5 cm

SO01837P-1 - 15x50x1,5 cm
SO01839A - 46x33x0,5 cm
SO01839A-1 - 46x33x1 cm
SO01839B - 22x17x1,2 cm
SO01839C - 60x60x2,5 cm
SO01839D - 90x50x2,5 cm
SO01839E - 75x25x2 cm
SO01839F - 10x15x2 cm
SO01839G - 15x66x1,3 cm
SO01839H - 70x50x1,6 cm
SO01839I - 100x50x1,6 cm

POSIZIONATORI SALA OPERATORIA



SO01836

Lastre in rilievo per tavolo operatorio

SO01836A - 50x50x1,6 cm
SO01836B - 115x50x1,6 cm
SO01836C - 40x23x1,6 cm
SO01836D - 91x45x1,6 cm



SO01838

Lastre con intaglio per tavolo operatorio

SO01838A - 117x50x1 cm
SO01838A-1 - 117x50x1,5 cm
SO01838B - 100x50x1 cm
SO01838B-1 - 100x50x1,5 cm
SO01838C - 50x50x1 cm
SO01838C-1 - 50x50x1,5 cm




SO01847

Lastra sacrale

SO01847A cm 40x40x1,6
SO01847B cm 46x40x1,6
SO01847C cm 46x46x1,6
SO01847D cm 50x46x1,6
SO01847E cm 50x50x1,6

Posizionatori

per Sala Operatoria Monouso

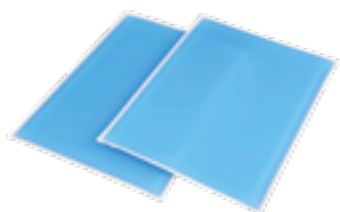

SO01831


Cuscino per staffe Lloyds

SO01831A - 31x23x1 cm

SO01831B - 40x25x1 cm

SO01831C - 52x30x1 cm

SO01831D - 55x52x1 cm

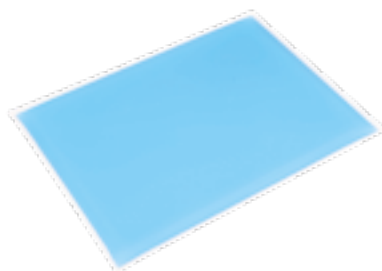

SO01829

Posizionatore graduato

SO01829

23x36x3,8 cm




SO01830

Posizionatore per culla

SO01830

30,5x66x1,27 cm

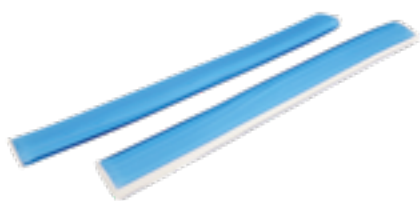


SO01834

Cuscino per litotomia

SO01834

71x12x0,8 cm

(SET di 2 pezzi)

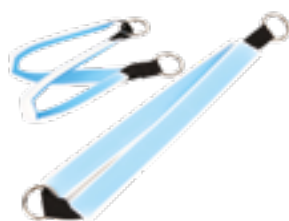

SO01835

Fasce di protezione per caviglia

SO01835A

31x4x1 cm

(SET di 2 pezzi)

SO01835B

44x4,5x1 cm

(SET di 2 pezzi)



SO01840

Cintura di posizionamento

SO01840

50,5x8,5x0,8 cm

POSIZIONATORI SALA OPERATORIA

Posizionatori per Sala Operatoria monouso

I posizionatori monouso Bi-FOAM per sala operatoria offrono comfort al paziente e prevengono le contaminazioni durante le procedure chirurgiche.



Bcode

Trova info su questa categoria subito on-line con questo codice

I dispositivi in poliuretano sono una valida alternativa a quelli pluriuso, a volte vanno associati a quelli in gel per aumentare il comfort del paziente sul lettino operatorio, quindi durante gli interventi di lunga durata.

Completano e ottimizzano il posizionamento finale che risulta insufficiente con i soli dispositivi in gel, soprattutto durante gli interventi di lunga durata.

I Bi-FOAM creano inoltre un'ottima aderenza antiscivolo nelle posizioni che prevedono la massima inclinazione. Consigliati negli interventi sporchi per non danneggiare o inquinare il gel, che a causa di microlesioni potrebbe assorbire materiale infetto o difficile da espellere.

La nostra gamma Bi-FOAM è composta di molteplici modelli e forme, per adattarsi ad ogni specifica area anatomica. I Posizionatori monouso sono realizzati in poliuretano espanso elastico ed indeformabile 25 kgm³ +/-5%, atossico e latex free.

Codice	Taglia	Dimensioni	Forma
SO02800	U	ø 23 x 5 cm	
SO02803	U	23x23x6/10	
SO02802	U	23x22x5/10	
SO02805	U	13,5x61x7v	
SO02815B8	U	90x8 cm	
SO02807	U	42x26,5x14	
SO02808	U	17x18x3,5 cm	
SO02814	U	7,6x152,4 cm	
SO02806	U	38x15,5x3,5 cm	
SO02813	U	183x51x5 cm	



SO02800

**Appoggiatesta
a ciambella**



SO02802

**Appoggiatesta
con foro per adulto**



SO02803

**Posizionatore per
testa con foro**


SO02800 diametro cm 23x5

SO02802 23x22x5/10

SO02803 23x23x6/10 cm

Posizionatori

per Sala Operatoria Monouso

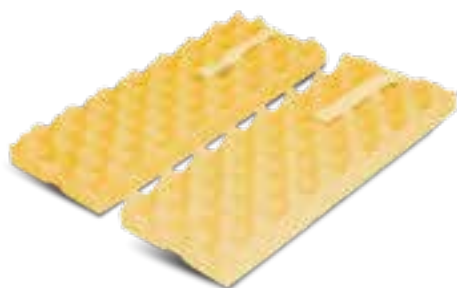

SO02806

Lastre bugnate

SO02806 38x15,5x3,5 cm



SO02805

Protettore braccio per laminectomia

SO02805
13,5x61x7 cm



SO02807

Protettore per gamba anatomico


SO02807
42x26,5x14 cm



SO02808

Coppe per talloni bugnate

SO02808
17x18x3,5 cm

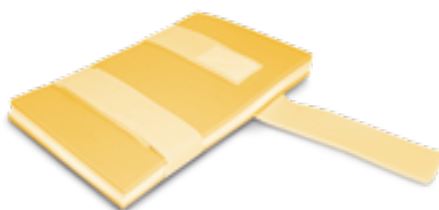

SO02811

Supporto Braccio

SO02811
55x35x2,5 cm



SO02813

Lastra bugnata

Soluzione economica ed efficace per il supporto del paziente durante tutti i tipi di interventi. È utilizzato con altri posizionatori, soprattutto durante interventi con paziente semicosciente.

SO02813
183x51x5 cm

Posizionatori

per Sala Operatoria Monouso



SO02820A - SO02820B

+ NEW

Posizionatore a rullo cilindrico monouso

Posizionatore monouso a rullo cilindrico, realizzato in poliuretano espanso elastico ed indeformabile 25 kgm³, atossico e latex free, non-ignifugo.

SO02820A

Ø 15cm - lunghezza cm 40

SO02820B

Ø 15cm - lunghezza cm 60

Dati tecnici

Materiale:

Poliuretano espanso T25 MKS colore giallo (produzione Italiana)

Confezionamento: Imbustato e confezionato sottovuoto singolarmente



SO02823

+ NEW

Posizionatore mezzo rullo in poliuretano

Posizionatore monouso a mezzo rullo semi-cilindrico, realizzato in poliuretano espanso elastico ed indeformabile con superficie in memory foam, atossico, non-ignifugo.

SO02823

20x23x9.5 cm (± 2%)

Dati tecnici

Materiale:

Poliuretano espanso non ignifugo. Disponibile su richiesta il modello ignifugo. Monouso - Non sterile

Confezionamento: Imbustato singolarmente in busta trasparente



SO02830

+ NEW

Posizionatore laterale regolabile per capo

Posizionatore monouso in PU per alloggiare il capo in caso di operazioni che richiedano il posizionamento laterale. Realizzato in PU, lo strato superiore è in memory foam viscoelastico per contrastare ogni effetto della pressione sul viso del paziente ed evitare danni da decubito. La struttura del posizionatore è composta da strati facilmente regolabili che consentono diverse opzioni di regolazione dell'altezza per ottenere un corretto allineamento della colonna vertebrale ed un foro centrale per l'orecchio del paziente. Il design ergonomico permette l'uso anche per interventi laterali prolungati.

SO02830

28x20x17/25

Dati tecnici

Materiale:

Poliuretano espanso non ignifugo. Disponibile su richiesta il modello ignifugo. Monouso - Non sterile

Confezionamento: Imbustato singolarmente in busta trasparente

Posizionatori

per Sala Operatoria Monouso



SO02814

Supporto per arti con Velcro

Offre una soluzione economica ed efficiente per una contenzione leggera dei pazienti durante le procedure mediche. Supporto per arti realizzato in poliuretano espanso e poliammide, spessore mm 6 +/- 0,3, con chiusura in Velcro.

SO02814

64X5 cm (20 pz/scatola)

Dati tecnici

Materiale:

Poliuretano espanso 54%

Poliammide 46%



SO02815B8

+ NEW

Fissaggio toracico

Realizzato in poliuretano espanso e poliammide, spessore mm 6 +/- 0,3, con chiusura in Velcro.

SO02815B8

140X8 cm (LxH)



SO02819A - SO02819B

+ NEW


Fasce con velcro per gambe

SO02819A

Fasce con velcro per gambe taglia L
cm 220x10 (64 pz/scatola)

SO02819B

Fasce con velcro per gambe taglia M
cm 150x10 (80 pz/scatola)

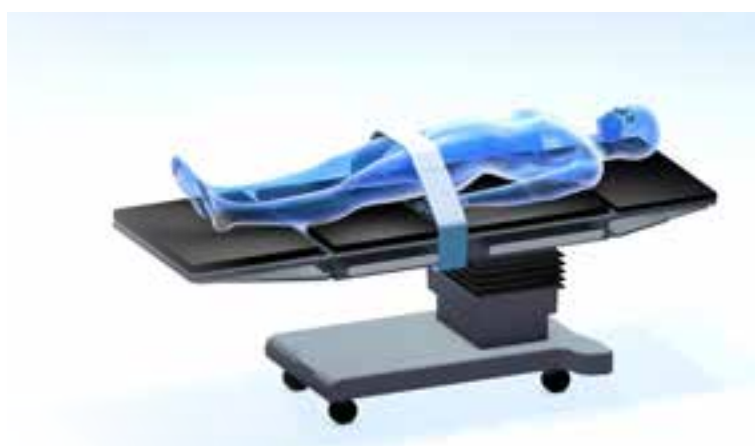

POSIZIONATORI SALA OPERATORIA

BIOMATRIX
PRODOTTI MEDICALI

Posizionatori in poliuretano pluriuso per sala operatoria e degenza post-operatoria

Linea di posizionatori realizzata in poliuretano a struttura portante, rivestiti da una vernice atossica impermeabilizzante. Simili alla gamma Bi-FOAM nella leggerezza, nella traspirabilità e nella facilità di utilizzo, si differenziano per la particolare pellicola che li riveste permettendo di sanificare gli ausili rendendoli riutilizzabili.

Sono pensati per adattarsi e sostenere le diverse parti del corpo del paziente, sia durante gli interventi, che nella fase immediatamente successiva, ovvero durante il recupero post-operatorio.

La pulizia può essere effettuata con disinfettanti diluiti fino al 5% anche a base alcolica, oppure con un panno imbevuto in acqua (fino a 60° C) e detergente neutro.

POSIZIONATORI SALA OPERATORIA



CD01600

Cuscino a ciambella

Protegge e sostiene la testa, le orecchie, il collo ed il viso in fase di operazione chirurgica.

CD01600S

Ø 20 cm

CD01600L

Ø 24 cm



CD01606

Divaricatore

Usato per garantire un'apertura assistita e confortevole delle gambe.

CD01606S

15x9x7,5/13 cm

CD01606L

15x16x14/20 cm



CD01610

Talloniera anti-equina

Usato in presenza di piede equino.

CD01610

23x46 cm



CD01601

Posizionatore appoggiatesta

Protegge e sostiene la testa in fase di operazione chirurgica.

CD01601
27x24x9 cm



CD01602

Cuscino trapezoidale

Indicato durante le operazioni alle tonsille, intubazioni e posizioni ventrali.

CD01602S
30x25x10/5 cm
CD01602M
40x25x6/2,5 cm
CD01602L
40x25x10/5 cm



CD01603

Cuscino triangolare

Indicato per l'anestesia dorsale.

CD01603S
30x20x10 cm
CD01603L
40x25x18 cm



CD01604

Cuscino triangolare

Indicato per il decubito laterale di 30°.

CD01604S
55x25x18 cm
CD01604L
70x25x18 cm



CD01608

Cuscino cilindrico

Indicato per la protezione di ginocchia e bacino.

CD01608S
ø 40x15 cm
CD01608L
ø 60x15 cm



CD01609

Appoggiabraccio dotato di impugnatura

Usato per il posizionamento e riposo del braccio e della spalla.

CD01609
50x12x15 cm

Posizionatori

per Sala Operatoria in Poliuretano

Posizionatori realizzati in poliuretano a struttura portante o in poliuretano stampato a freddo, privi di pellicola protettiva, ma forniti provvisti di cover di rivestimento.

A seconda del trauma riportato e del tipo di intervento subito dal paziente, verranno consigliati ausili con cover in cotone oppure in poliuretano bielastico, traspirante.



Riabilitazione



Terapia intensiva



Lungodegenza



Divaricatore inguinale monouso

CD01605D

+ NEW

Divaricatore in poliuretano espanso con scanalature laterali, disponibile in diverse densità a seconda della destinazione d'uso richiesta: monouso se usato in sala operatoria oppure mono paziente se utilizzato in fase di recupero da chirurgia dell'anca o di riabilitazione da altri traumi.

Accessori

Può essere fornito con una o due cinghie di fissaggio regolabili con chiusura a Velcro, per immobilizzare gli arti inferiori del degente e/o per fissare il divaricatore al tavolo operatorio.

CD01605D

40x47x20/14 cm

Cinghie: 8 cm



CD01605

Divaricatore inguinale con cover bielastica

Divaricatore sagomato favorisce una bassa pressione nelle zone d'appoggio.

CD01605

40x47x20/14



CD01607

Divaricatore con cover in cotone

Dispositivo di posizionamento ideale per sostenere gli arti inferiori nel periodo post operatorio.

CD01607S

44x27x13 cm

CD01607L

50x35x20 cm



CD01610PO

Ferula post operatoria

Utilizzata in ortopedia e traumatologia per il contenimento e l'immobilizzazione dell'arto inferiore dopo la frattura o l'intervento.

CD01610PO

73x35x53 cm



Igiene

www.biomatrix.it



Igiene

Una selezione di Dispositivi per l'Igiene affidabili, sicuri e prodotti con materiali tecnici di alta qualità.

I reparti ospedalieri a causa dell'afflusso di pazienti, del personale tecnico sanitario e del frequente contatto con agenti esterni, possono fungere da veicolo per il proliferare di contaminazioni ed infezioni di tipo batterico e virale.

L'igiene del personale medico e dei pazienti è pertanto determinante per abbattere quanto più possibile il rischio di contaminazione che potrebbe compromettere la salute sia dei degenti che degli operatori.

● **Bcode**

Trova info su questa categoria subito on-line con questo codice



○ Igiene orale del paziente

La cavità orale è fonte di infezioni quali polmoniti nosocomiali e da ventilazione associata (VAP).

La presenza di placca dentale, muco e secrezioni facilita la colonizzazione batterica dell'area e la proliferazione dei patogeni, aumentando la permanenza del paziente nel reparto di terapia intensiva.

Al fine di prevenire l'insorgenza di tali patologie è opportuno sviluppare e mettere in atto un protocollo completo per l'igiene che possa includere l'uso di disinfettanti, l'impiego di presidi adeguati ed un'idratazione del cavo orale, in modo da tutelare nel migliore dei modi la salute del paziente, consentendo anche un risparmio economico alla struttura ospedaliera.

○ Igiene delle mani per operatori e pazienti

È fondamentale garantire l'igiene delle mani del personale tecnico-sanitario e dei pazienti nella fase preoperatoria per prevenire il rischio di eventuali infezioni e assicurare condizioni igieniche ottimali.



Oral Swab

Ideale in:



Terapia intensiva

Tre differenti tipologie di tamponi per l'igiene orale per pazienti sia parzialmente collaboranti che intubati.

L'operatore deve garantire l'assistenza nell'igiene orale al paziente se quest'ultimo è cosciente o parzialmente cosciente; in casi più gravi, l'operatore deve eseguire personalmente tutte le operazioni.

Cleaning Swab



IG011000-IG011000B

Cleaning Swab oltre a rimuovere i detriti presenti nel cavo orale effettua una stimolazione del tessuto gengivale. Dotato di soffice testina di schiuma con creste marcate, consente anche una pulizia interdentale ed elimina la parte di tessuto devitalizzato. Può essere anche utilizzato per l'applicazione di creme lenitive.

Disponibile con (IG011000B) e senza bicarbonato (IG011000).

Aspiration Swab



IG011001-IG011001B

Aspiration Swab permette di rimuovere i detriti e le secrezioni nelle diverse operazioni di pulizia del cavo orale. Grazie alla morbida testina in schiuma pulisce delicatamente i denti stimolando il tessuto gengivale. È munito di una presa ergonomica per il pollice, garantendo un controllo assoluto del dispositivo con l'utilizzo di una sola mano. L'estremità dell'attacco, essendo conica, può adattarsi a qualsiasi tipo di aspiratore.

Disponibile con (IG011001B) e senza bicarbonato (IG011001).

Brush Swab



IG011002-IG011002B

Brush Swab permette di rimuovere i detriti e le secrezioni nelle diverse operazioni di pulizia del cavo orale. Grazie alla morbida testina in schiuma pulisce delicatamente i denti stimolando il tessuto gengivale, inoltre le setole rimuovono efficacemente la placca dentale. È munito di una presa ergonomica per il pollice, garantendo un controllo assoluto del dispositivo con l'utilizzo di una sola mano. L'estremità dell'attacco, essendo conica, può adattarsi a qualsiasi tipo di aspiratore.

Disponibile con (IG011002B) e senza bicarbonato (IG011002).

Caratteristiche tecniche

Scatola: 1000 pezzi

Confezionati: singolarmente

Utilizzo: Monouso

Materiale: Latex free

Soffice testina di schiuma
con creste marcate

Caratteristiche tecniche

Scatola: 800 pezzi

Confezionati: singolarmente

Utilizzo: Monouso

Materiale: Latex free

Presa ergonomica per il pollice

Caratteristiche tecniche

Scatola: 600 pezzi

Confezionati: singolarmente

Utilizzo: Monouso

Materiale: Latex free

Soffice testina: di schiuma e
stole

Igiene delle mani per operatori e pazienti

La preparazione chirurgica delle mani rappresenta un momento cruciale per garantire la sicurezza igienica durante le procedure mediche.

Ha come obiettivo la riduzione del rilascio di batteri dalle mani dell'equipe chirurgica per tutta la durata della procedura, in modo che, in caso di ipotetica rottura non rilevata del guanto chirurgico, questi non contaminino il campo operatorio.

Ideale in:



Sala operatoria



IG011010

Spazzola chirurgica monouso con spugna e setole

Prodotto ideale per garantire comfort e adattabilità. Evita irritazioni, riducendo il rischio di infezioni. Setole soffici per la pulizia di unghie e nocche e spugna per la pulizia della pelle di mani e avambracci. Dotato di un pulisci unghie. Prodotto sterile.

Caratteristiche tecniche

Scatola: 450 pezzi (15 dispenser da 30 unità)

Dispenser: 100 pezzi

Utilizzo: Monouso

Disponibile nelle versioni:

senza disinfettanti (**IG011010**)

con clorexidina (**IG011010C**)



Notes

[illegible]



POSIZIONATORI SALA OPERATORIA

BioMatrix

Via Maffini, 23 - 29010 San Giuliano di Castelvetro (PC)
Tel. 0523.826619 Fax. 0523826728
e-mail: info@biomatrix.it

Tutti i diritti sono riservati. Variazioni possono essere apportate senza obbligo di preavviso.
BioMatrix S.r.l non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questa sede.

www.biomatrix.it

